



Reliance Orthodontic Products, Inc.

Bond Aligner® Ref# BA

Transparenter Kleber für die Verbindung mit klaren thermoplastischen Aligner.

Er ist nicht für den Einsatz mit trüben (Klasse C) Thermomaterial geeignet.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

1. Tragen Sie den klaren Kleber Bond Aligner® auf das zu verklebende Attachment auf.

Der Aligner sollte sauber und frei von oralen Flüssigkeiten oder Biofilmen sein, wenn das Attachment verklebt wird.

2. Platzieren Sie das Attachment auf dem Aligner und aktivieren Sie mit Licht für 10-20 Sekunden (abhängig von der Intensität der Lampe).

VORSICHTSMASSNAHMEN: Nicht polymerisierte Harze können bei empfindlicher Haut ein Reizempfinden verursachen. Bei Berührung mit der Haut gründlich mit Wasser und Seife waschen. Bei Kontakt mit anderem Gewebe: Spülen Sie den Bereich sofort mit reichlich Wasser für mehrere Minuten.

Der Einsatz von UV-, Halogen- und LED-Härtungslampen kann mit Augenschäden verbunden sein.

Arzt und Assistentin sollten bei der Verwendung dieser Produkte eine geeignete Schutzbrille tragen.

Lagerung: Bei Raumtemperatur (15-30° C)

RX: Per Gesetz ist dieses Produkt beschränkt auf den Einsatz durch zahnärztliches Fachpersonal.

Rechtliche Hinweise:

ATS ORTHO bemüht sich, korrekte und vollständige Informationen zur Verfügung zu stellen. Es wird jedoch keine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen übernommen. Es wird keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden übernommen, die aufgrund oder in Verbindung mit dieser Anleitung stehen.

Es liegt in Verantwortung des Anwenders zu prüfen, ob das Produkt für den von ihm beabsichtigten Verwendungszweck geeignet ist. Der Anwender übernimmt diesbezüglich jegliches Risiko und jegliche Haftung.

Hasbergen, August 2019



Orthodontic | Service | Europe

ATS ORTHO GmbH & Co. KG
Alfred-Delp-Straße 5 | 49134 Wallenhorst-Hollage | Germany

+49 (0) 5407 / 89 440 - 10
+49 (0) 5407 / 89 440 - 15
service@ats-ortho.de

www.ats-ortho.de