



Porzellan Ätzer incl. Abdeckgel

Produktbeschreibung:

Porc Etch ist für den Einsatz glasierter, zahnmedizinischer Porzellanoberflächen bestimmt. Porc Etch bereitet alle Porzellanoberflächen für die Anwendung des Porzellan-Konditioners vor. Reliance Porzellan Konditioner ist für die Anwendung auf Keramikverblendungen entwickelt. Der Konditioner (Primer) ist ein Silanisierungsmittel, das einen chemischen Verbund zwischen dem Silikat der Keramik und dem Methacrylat von Phase II, Excel, Rely a Bond, Light Bond und Band-Lok / Ultra Band Lok sowie Assure herstellt.

Anwendung:

Vorsicht: Porc Etch enthält 4% Flusssäure. Das Material darf nicht mit der Gingiva in Kontakt kommen. Der Einsatz eines Kofferdamms wird empfohlen.

Rauen Sie mit einem Microetcher die Oberfläche leicht an. Wenn kein Sandstrahlgerät zur Verfügung steht, nutzen Sie einen feinen Diamanten.

Das Barriere Gel zum Schutz der Gingiva gründlich auftragen. Vorsichtig eine dünne Schicht des Porc Etch auf die Krone oder die Verblendung auftragen. Warten Sie vier Minuten und wischen Sie das Porc Etch mit einer Watterolle oder einem Pad ab. Unter Verwendung einer Absaugvorrichtung mit Wasser komplett abspülen.

Vorsichtig die Oberfläche trocknen und eine gleichmäßige Schicht des Reliance Porzellan Konditioner auf die Keramikfläche auftragen. Lassen Sie den Konditioner 60 Sekunden trocknen. Vermeiden Sie unbedingt jedes Spülen, Lufttrocknen oder eine Speichelkontamination vom Zeitpunkt des Konditionierens an.

Bei Verwendung mit Phase II oder Excel:

Mischen Sie Resin A und Resin B (bei Maximum Cure mischen Sie Sealant A und B). Tragen Sie eine dünne Schicht auf die Porzellanoberfläche. Mischen Sie anschließend Phase II oder Phase II Dual Cure oder Excel Paste A und B und platzieren Sie diese auf die Bracketbasis. Positionieren Sie das Bracket auf dem Zahn.

Bei Verwendung von Rely a Bond:

Tragen Sie eine dünne Schicht Primer auf die vorbereitete Keramikfläche und auf die Bracketbasis auf. Geben Sie dann die Adhäsivpaste auf das Bracket, positionieren Sie es und drücken Sie es fest an.

Bei Verwendung von Light Bond:

Tragen Sie eine dünne Schicht des Light Bond Sealant oder Pro Seal auf die konditionierte Porzellanoberfläche auf und härten Sie mit Licht 10 Sekunden, bei Pro Seal 20 Sekunden aus. Applizieren Sie die lichthärtende Paste auf der Bracket Basis und positionieren Sie das Bracket auf dem Zahn. Härten Sie anschließend das Adhäsiv mit Licht aus.

Bei Verwendung von Assure:

Tragen Sie eine großzügige oder zwei Schichten Assure Universal Resin auf die konditionierte Zahnoberfläche. Warten Sie 10 Sekunden. Anschließend trocken Sie für ca. 5 Sekunden leicht mit Luft und härten für 10 Sekunden mit Licht aus. Applizieren Sie die Assure Paste auf die Bracket Basis und positionieren Sie das Bracket auf dem Zahn. Härten Sie anschließend das Adhäsiv mit Licht aus.

Generelle Information:

Dieses Produkt ist nur durch den Zahnarzt oder Kieferorthopäden zu verwenden.

Der Einsatz von UV, Halogen und LED Licht zur Aushärtung kann die Augen verletzen. Bitte bei der Anwendung die erforderliche Schutzbrille tragen.

Ätzmittel können schwere Augen- und Gewebereizungen hervorrufen.

Bei Kontakt bitte sofort mit reichlich Wasser ausspülen bzw. abspülen.

Bei Augenkontakt bitte zusätzlich einen Arzt aufsuchen.



Orthodontic | Service | Europe

ATS ORTHO GmbH & Co. KG
Alfred-Delp-Straße 5 | 49134 Wallenhorst-Hollage | Germany

☎ + 49 (0) 5407 / 89 440 - 10

☎ + 49 (0) 5407 / 89 440 - 15

@ service@ats-ortho.de

www.ats-ortho.de