



*Reliance Orthodontic Products, Inc.*

## **Plastik Conditioner # PL**

### **ANWENDUNGSHINWEISE:**

Der Reliance Plastik **Conditioner** stellt einen chemischen Verbund her zwischen Kunststoff Brackets oder Kunststoff Apparaturen. Er dient zur Vorbereitung des Klebevorgangs mit jedem Kleber, Sealant oder Zement. Er kann auch zur Konditionierung einer Composite-Restauration verwendet werden.

### **GEBRAUCHSANWEISUNG:**

Mit einer Bürste oder einem Schwämmchen eine dünne, gleichmäßige Schicht Reliance Plastik Primer auf die zu beklebende Fläche auftragen. Warten Sie mindestens 60 Sekunden, bevor Sie die Klebepaste auftragen.

### **VERBINDEN MIT EINER KOMPOSITE-RESTAURATION:**

Fräsen Sie die Oberfläche des Komposit leicht mit einem feinen Diamanten an, um den Glanz zu entfernen. Reinigen Sie den Bereich mit Luft. Tragen Sie danach mit einem Schwämmchen oder einer Bürste eine dünne, gleichmäßige Schicht Reliance Plastik Primer auf und lassen sie trocknen. Geben Sie danach eine dünne Schicht Kleber auf die konditionierte Oberfläche und setzen Sie das mit Kleber versehene Bracket auf den Zahn und positionieren Sie es.

Wenn Sie mit Rely-a-Bond® arbeiten, tragen Sie den Primer auf die konditionierte Oberfläche und auf die Bracket Basis. Geben Sie die Paste auf die Bracket Basis und positionieren Sie das Bracket.

**HINWEIS: FÜR JEDEN PATIENTEN WIRD EIN NEUER APPLIKATOR BENÖTIGT.**

**VORSICHTSMASSNAHMEN:** Nicht polymerisierte Harze können bei empfindlicher Haut ein Reizempfinden auslösen.

Bei Berührung mit der Haut gründlich mit Wasser und Seife waschen. Bei Kontakt mit dem Auge, mit reichlich Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen.

Temperaturbegrenzung: Bei Raumtemperatur (15-30 Grad C) lagern.

Vermeiden Sie übermäßige Hitze.

**RX: Per Gesetz ist dieses Produkt beschränkt auf den Einsatz von zahnärztlichem Fachpersonal.**

**ATS ORTHO**

Orthodontic | Service | Europe

ATS ORTHO GmbH & Co. KG  
Alfred-Delp-Straße 5 | 49134 Wallenhorst-Hollage | Germany

☎ +49 (0) 5407 / 89 440 - 10

☎ +49 (0) 5407 / 89 440 - 15

@ service@ats-ortho.de

[www.ats-ortho.de](http://www.ats-ortho.de)