



## **Porzellan Konditionierer**

ZUM VERKLEBEN MIT PORZELLANKRONEN UND VERBLENDUNGEN

Bestimmungsgemäßer Gebrauch:

Reliance Porzellan Konditioner ist zum silanisieren von Dentalporzellan bestimmt.

Der Porzellan Konditioner ist ein Silan-Haftvermittler, der sich chemisch mit dem Silizium im Porzellan und dem Acrylat in chemischen, lichthärtenden und dualhärtenden Klebstoffen verbindet.

### **Gebrauchsanweisung**

1. Geben Sie einen Tropfen Porzellan-Konditioner in ein Mischgefäß.
2. Die Porzellanoberfläche mit einem Microetcher Sandstrahlen oder mit einem feinen Diamanten aufrauen, spülen und trocknen.
3. Tragen Sie mit einem Applikator eine dünne Schicht Reliance Porzellan Konditioner auf. Warten Sie mindestens 3-4 Minuten.

Mit Luft 20 Sekunden leicht trocknen. Wenn warme Luft zum Trocknen verwendet wird, kann die Wartezeit auf 1 Minute reduziert werden.

**HINWEIS: FÜR JEDEN PATIENTEN WIRD EIN NEUER APPLIKATOR BENÖTIGT.**

4. Eine Schicht Assure Plus auftragen, leicht an der Luft trocknen und 10 Sekunden lang lichthärten. Wenn Assure Plus nicht verfügbar ist, muss nach Schritt 1 mit Porc-Etch konditioniert werden.
5. Geben Sie eine lichthärtende, dual- oder chemisch härtende Paste auf die Bracket Basis und positionieren Sie es auf dem Zahn. Wenn eine Lichthärtung erforderlich ist, folgen Sie bitte den Produkthanweisungen des Herstellers.

Wenn Rely-a-Bond® verwendet wird, bitte eine dünne Schicht Primer auf die Bracket Basis und die konditionierte Porzellanoberfläche auftragen. Tragen Sie die Rely-a-Bond® Paste auf die Bracket Basis auf und positionieren Sie das Bracket auf dem Zahn und drücken Sie fest an.

Wenn Sie Phase II® oder Excel® verwenden, geben Sie Paste auf die Basis und platzieren Sie das Bracket.

### **VORSICHTSMASSNAHMEN**

Bei empfindlichen Personen kann der Kontakt mit der Haut Reizungen hervorrufen. Im Falle von Kontakt mit der Haut, gründlich mit Wasser und Seife waschen. Wenn versehentlich etwas in das Auge gelangt, bitte sofort mit reichlich Wasser spülen und unmittelbar einen Arzt aufsuchen.

**WURDE DIE FLASCHE VERUNREINIGT, BITTE NICHT WEITER VERWENDEN**

**VORSICHT:** Porzellan Konditionierer ist brennbar.

Lagerung: Bei Raumtemperatur (15-30 Grad C) lagern.

**RX: Per Gesetz ist dieses Produkt beschränkt auf den Einsatz von zahnärztlichem Fachpersonal.**